

20
22

Instruções de uso



GPHANTOM TIREOIDE



APRENDA. PRATIQUE. APRIMORE.

Obrigado por escolher a Gphantom!

Somos uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para treinamento médico. Caso deseje algum modelo específico para seu treinamento, entre em contato conosco. Aqui vamos ajudá-lo a manusear e otimizar a durabilidade do seu produto.

O seu Gphantom Tireoide é elegível ao Programa de Fidelidade Gphantom.

Consulte condições.





SOBRE O PRODUTO

- 1** Indicamos a utilização de agulhas com espessuras iguais ou inferiores à 21G. Ao longo do treinamento, de acordo com a execução dos procedimentos, marcas de agulha poderão permanecer em seu Gphantom por até 2 dias. Para melhor aproveitamento dessa tecnologia de recuperação do material, deixe seu produto em local fresco, ao abrigo do sol, por 48 horas após a utilização;
- 2** Recomendamos movimentos de até 30 graus com relação à superfície do produto, utilizando agulhas como as mencionadas no item anterior. Evite movimentos muito longos (grande angulação) após a inserção da agulha, pois poderão diminuir a vida útil de seu modelo;
- 3** Não é recomendada a injeção ou a retirada de materiais de seu Gphantom durante a utilização. Caso possua essa necessidade, entre em contato conosco;
- 4** No Gphantom Tireoide são simuladas as principais estruturas presentes na região da tireoide, como os lobos direito e esquerdo, traqueia, estruturas venosas e lesões típicas da região. É indicado para o treinamento do procedimento de biópsia por agulha fina (PAAF).





MANUSEIO E CONSERVAÇÃO

- 1 Guarde sempre o seu produto na embalagem e em local fresco, ao abrigo do sol;

Observação: Expor seu Gphantom à temperaturas acima de 30°C, por longos períodos, pode provocar deformações e perda de propriedades.

- 2 Para o treinamento, retire apenas a tampa da embalagem, mantendo o produto na base original;

- 3 Após o treinamento, limpe o produto com papel toalha, retirando o excesso de gel para ultrassom e, em seguida, lave-o em água corrente, sem retirá-lo da base;

Observação: Não guarde o Gphantom com excesso de gel, pois poderá provocar mau cheiro, reduzindo assim, a durabilidade do produto.

- Não use detergentes ou esponjas, pois estes danificam o produto!

- 4 Após a limpeza, guarde o seu Gphantom conforme as instruções contidas no item 1;

- 5 O Gphantom Tireoide é um produto com fins didáticos, destinado, APENAS, para treinamentos médicos. Em caso de dúvida, entre em contato através dos nossos canais de relacionamento.



ESPECIFICAÇÕES





CÓDIGO DO PRODUTO PBD050504

PESO APROXIMADO 700 g

COMPRIMENTO 17 cm

ALTURA 4 cm

LARGURA 13 cm

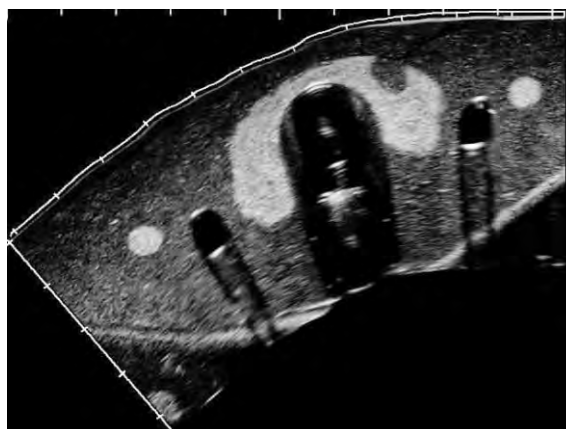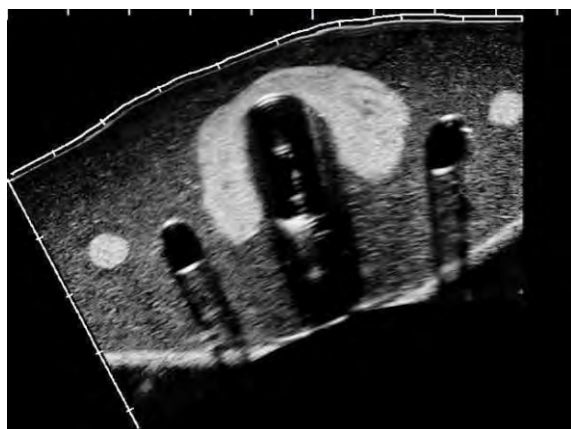

Imagens de ultrassom Modo B do Gphantom Tireoide^[1].



[1] As imagens podem conter pequenas alterações.

APRENDA. PRATIQUE. APRIMORE.

**Para quaisquer dúvidas ou solicitações,
entre em contato conosco:**



(16) 98848-2468



contato@gphantom.com.br